

Mepitel®

Pansement interface siliciné

fr

Description du produit

Mepitel est un pansement interface transparent, perforé et non absorbant. Sa structure perforée permet le passage des exsudats vers un pansement secondaire absorbant. Cette structure permet de diminuer la fréquence de renouvellement du pansement primaire et de minimiser les traumatismes pour la plaie lors du renouvellement du pansement secondaire. Le pansement est composé d'une couche d'enduction de silicone souple, côté plaie, issue d'une technologie unique à base d'adhésif siliciné : la technologie Safetac®. Elle minimise la douleur du patient et les traumatismes sur la plaie et la peau périlésionnelle lors du retrait du pansement.

Mepitel est composé :

- d'une couche d'enduction de silicone souple issue de la Technologie Safetac sur les 2 faces
- d'une trame perforée transparente et flexible en polyamide.

Composition du pansement :

Silicone, polyamide.

Indications

Mepitel est un pansement interface perforé permettant le passage de l'exsudat tout en maintenant les tissus en place et en les protégeant.

Mepitel est indiqué dans le traitement de nombreux types de plaies exsudatives, comme les déchirures cutanées, les dermabrasions, les plaies suturées, les brûlures du deuxième degré, les lacérations, les greffes totales ou partielles, les ulcères du pied diabétique, les ulcères de jambe veineux ou artériels.

Mepitel peut aussi être utilisé en protection sur des plaies non exsudatives, des phlyctènes, des peaux fragilisées et des tissus exposés fragilisés.

Mises en garde

Si Mepitel est utilisé en association avec les systèmes de TPN, indiquer systématiquement le nombre de pansements ou de pièces découpées de Mepitel utilisés dans le dossier du patient pour s'assurer qu'aucun pansement Mepitel ou morceau ne reste dans la plaie lors du changement du pansement.

Précautions d'emploi

- En présence de signes cliniques d'infection, par exemple en présence de fièvre ou si la plaie ou la peau périlésionnelle devient rouge, chaude ou gonflée, consulter un professionnel de santé qui prescrira un traitement adapté.
- S'il est utilisé sur des brûlures du deuxième degré à haut risque de granulation rapide ou après resurfaçage facial : éviter toute pression sur le pansement, soulever et repositionner le pansement au moins tous les deux jours.
- Lorsqu'il est utilisé sur une plaie hémorragique ou produisant un exsudat d'une viscosité élevée, Mepitel doit être recouvert d'un pansement secondaire absorbant et préalablement humidifié.
- Lorsque Mepitel est utilisé pour fixer les greffes de peau et dans la protection des phlyctènes, le pansement ne doit pas être changé dans les cinq jours suivant sa pose.

fr

- Ne pas utiliser le pansement Mepitel chez des patients et/ou des utilisateurs présentant une hypersensibilité connue aux composants du produit.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé. Ne pas restériliser.

Mode d'emploi

Mepitel peut être utilisé par des particuliers sous la supervision de professionnels de santé.

1. Nettoyer la plaie selon le protocole de soins en vigueur et sécher soigneusement la peau périlésionnelle.
2. Choisir une taille de Mepitel qui recouvre la plaie et déborde sur la peau périlésionnelle sur au moins 2 cm. Si nécessaire, Mepitel peut être découpé.
3. Tout en tenant le grand film protecteur, retirer le petit feuillet. Humidifier les gants pour éviter qu'ils ne collent à Mepitel.
4. Appliquer Mepitel sur la plaie et retirer le film protecteur restant. Lisser Mepitel une fois placé sur la peau périlésionnelle pour assurer l'étanchéité. En cas d'utilisation de plusieurs pansements Mepitel, les pansements doivent se chevaucher sans obstruer les pores.
5. Appliquer un pansement secondaire absorbant au-dessus de Mepitel. Sur les zones courbes ou sur les articulations (p. ex. sous le bras, sous le sein, au creux du coude, à l'aîne ou sur les plaies profondes), veiller à utiliser un pansement absorbant suffisant pour maintenir Mepitel à plat contre la surface de la plaie
6. Fixer le pansement à l'aide d'un système de fixation adapté.

Mepitel peut être utilisé sous des bandages compressifs. Mepitel peut être utilisé en association avec les systèmes de traitement de la plaie par pression négative (TPN). Mepitel peut être utilisé en association avec des gels.

En cas de saturation, le pansement secondaire absorbant doit être changé tout en laissant Mepitel en place.

Mepitel peut rester en place jusqu'à 14 jours selon l'état de la plaie et de la peau périlésionnelle, ou conformément au protocole de soins en vigueur. Pour prévenir tout risque de macération, les exsudats doivent passer librement au travers du pansement et les pores ne doivent pas être obstrués.

Si Mepitel est utilisé en association avec les systèmes de TPN, respecter les recommandations du clinicien quant à la fréquence de renouvellement.

L'élimination doit être effectuée conformément aux normes environnementales en vigueur.

Informations complémentaires

En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation du dispositif Mepitel, il doit être signalé à Mölnlycke Health Care ainsi qu'aux autorités locales compétentes.

Mepitel® et Safetac® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.